

ABRI-Form – u ležících pacientů



1. Kalhotky přeložíme podélně na polovinu, pro dosažení co největší savosti. Mezi kolena můžeme dát ručník pro snadnější vložení kalhotek. Přeložené kalhotky vložíme mezi stehna do třísel, ve směru zepředu dozadu.

2. Vložené kalhotky rozvineme vzadu.



3. Při otočení klienta z boku na záda, kalhotky rozvineme vepředu tak, aby uprostřed vzniklo tzv. „korýtko“



4. Kalhotky fixujeme nejdříve spodními pásky, pak horními pásky dotáhneme.



5. Ujistíme se, že kalhotky netlačí v tříslech, jsou vloženy souměrně, správně fixovány na těle a klient se cítí pohodlně.

ABRI-Form

Zalepovací kalhotky Abri vhodné pro imobilní, přikládat se mohou ve stoje i vleže.



1. Pro dosažení co největší savosti a snadnější vložení pomůcky, přeložíme kalhotky na polovinu.

2. Přeložené kalhotky vložíme mezi stehna a zasuneme do třísel.



3. Kalhotky rozvineme vpředu i vzadu, uprostřed se vytvoří tzv. „korýtko“.

4. Kalhotky připevníme lepícími proužky nejdříve spodním proužkem.



5. Nakonec fixujeme horním proužkem – dotáhneme. Není nutná následná fixace.



CHCETE NAŠE ZBOŽÍ PŘED ZAKOUPENÍM VYZKOUŠET?

NAVŠTIVTE

WWW.ABENA.CZ

UNTRACO s.r.o.
výhradní zastoupení pro ČR
Slavíkova 6139/18c
708 00 Ostrava-Poruba

www.abena.cz

ABENA®

...pečujeme o Vás



Aplikace
pomůcek
pro inkontinentní

Pro vyšší kvalitu života


ABRI-San

Vložná plena Abri San je určena zejména pro mobilní klienty. Vložnou plenu fixujeme fixačními pomůckami Abri Fix. Pro větší pleny jsou nejvhodnější Abri Fix Leaf a Abri Fix Soft Cotton.



1. Pro dosažení co největší savosti a snadnější vložení pomůcky, přeložíme plenu na polovinu.

2. Přeloženou plenu vložíme mezi stehna a zasuneme do třísel.

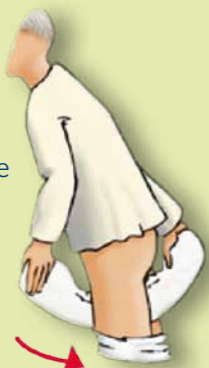

3. Plenu rozvineme vpředu.



4. Plenu rozvineme vzadu na hýždě. Uprostřed pomůcky se vytvoří tzv. „korýtko“.



5. Ujistíme se, že plena netlačí – hlavně v tříslech, plenu fixujeme fixačními pomůckami.



ABRI-San – u ležících pacientů



1. Vložnou plenu přeložíme podélně na polovinu, pro dosažení co největší savosti. Mezi kolena můžeme dát ručník pro snadnější vložení pleny. Přeloženou plenu vložíme mezi stehna do třísel, ve směru zepředu dozadu.

2. Vložnou plenu rozvineme vepředu i vzadu. Uprostřed pleny se utvoří tzv. „korýtko“ Zadní část pleny by neměla přesahovat výšku kostrče.



3. Vložnou plenu upevníme fixačními kalhotkami Abri Fix.


4. Ve stoje plenu upravíme tak, aby byla celá skryta pod fixačními kalhotkami.



5. Ujistíme se, že plena netlačí v tříslech, je správně fixována na těle a klient se cítí pohodlně.

ABRI-Flex

Navlékací kalhotky Abri Flex jsou vhodné pro mobilní klienty, na cestování, pro klienty provádějící návčiv kontinence, pro klienty s demencí.

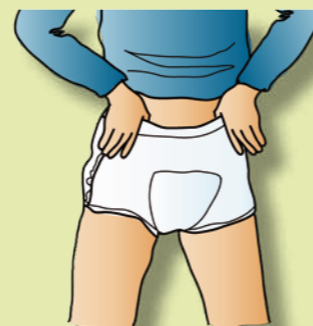

1. Pro dosažení co největší savosti a snadnější vložení pomůcky, přeložíme kalhotky na polovinu.


2. Navlékací kalhotky oblečeme jako osobní prádlo. Není nutná následná fixace.



3. Odstranění kalhotek provádíme roztržením na obou stranách ve švu.





ABRI-Wing Premium

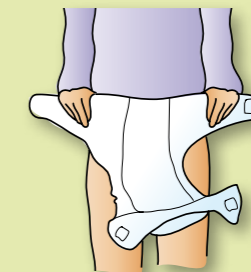

1. Rozložte pomůcku. Vytvořte tvar kanálu krátkým podélným sklopením. Nedotýkejte se vnitřního povrchu kalhotek.

2. Upevněte pás kolem vašich boků pomocí lepek.

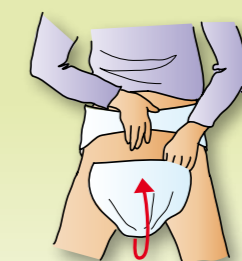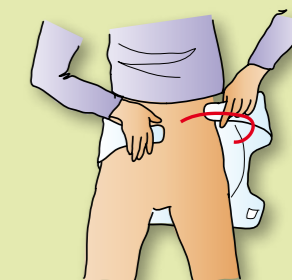

3. Vytáhněte pomůcku skrze stehna směrem dopředu.

4. Připojte přední část kalhotek k pásu pomocí lepících pásek na obou stranách. Ujistěte se, že okraje v oblasti třísel jsou otočeny od těla směrem ven.

