

ABENA SLIP PREMIUM

u ležících pacientů



- 1.** Kalhotky přeložíme podélně na polovinu, pro dosažení co největší savosti. Mezi kolena můžeme dát ručník pro snadnější vložení kalhotek. Přeložené kalhotky vložíme mezi stehna do třísel, ve směru zepředu dozadu.

- 2.** Vložené kalhotky rozvineme vzadu.



- 3.** Při otočení klienta z boku na záda, kalhotky rozvineme vpředu tak, aby uprostřed vzniklo tzv. „korytko“



- 4.** Kalhotky fixujeme nejdříve spodními pásky, pak horními pásky dotáhneme.



- 5.** Ujistíme se, že kalhotky netlačí v tříslech, jsou vloženy souměrně, správně fixovány na těle a klient se cítí pohodlně.

ABENA SLIP PREMIUM

Zalepovací kalhotky vhodné pro imobilní, přikládat se mohou ve stoje i vleže.



- 1.** Pro dosažení co největší savosti a snadnější vložení pomůcky, přeložíme kalhotky na polovinu.

- 2.** Přeložené kalhotky vložíme mezi stehna a zasuneme do třísel.



- 3.** Kalhotky rozvineme vpředu i vzadu, uprostřed se vytvoří tzv. „korytko“.

- 4.** Kalhotky připevníme lepícími proužky nejdříve spodním proužkem.



- 5.** Nakonec fixujeme horním proužkem – dotáhneme. Není nutná následná fixace.

www.abena.cz

ABENA®

...pečujeme o Vás



Aplikace
pomůcek
pro inkontinentní

Pro vyšší kvalitu života

ABENA SAN PREMIUM

Vložná plena ABENA San je určena zejména pro mobilní klienty. Vložnou plenu fixujeme fixačními pomůckami.



- 1.** Pro dosažení co největší savosti a snadnější vložení pomůcky, přeložíme plenu na polovinu.



- 2.** Přeloženou plenu vložíme mezi stehna a zasuneme do třísel.



- 3.** Plenu rozvineme vpředu.

- 4.** Plenu rozvineme vzadu na hýždě. Uprostřed pomůcky se vytvoří tzv. „korýtko“.



- 5.** Ujistíme se, že plena netlačí – hlavně v tříslech, plenu fixujeme fixačními pomůckami.

ABENA SAN PREMIUM

u ležících pacientů



- 2.** Vložnou plenu rozvineme vepředu i vzadu. Uprostřed pleny se utvoří tzv. „korýtko“
Zadní část pleny by neměla přesahovat výšku kostrče.



- 4.** Ve stoje plenu upravíme tak, aby byla celá skryta pod fixačními kalhotkami.



- 5.** Ujistíme se, že plena netlačí v tříslech, je správně fixována na těle a klient se cítí pohodlně.




- 3.** Vložnou plenu upevníme fixačními kalhotkami Abri Fix.



ABENA PANTS PREMIUM

Navlékací kalhotky Abena Pants jsou vhodné pro mobilní klienty, na cestování, pro klienty provádějící nácvik kontinence, pro klienty s demencí.

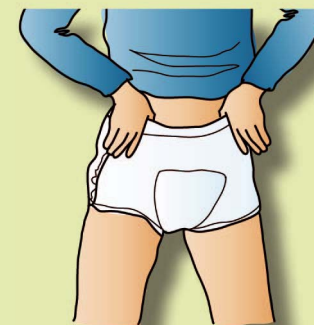

- 1.** Pro dosažení co největší savosti a snadnější vložení pomůcky, přeložíme kalhotky na polovinu.



- 2.** Navlékací kalhotky oblečeme jako osobní prádlo. Není nutná následná fixace.



- 3.** Odstranění kalhotek provádíme roztržením na obou stranách ve švu.

